


10. Sporteinlage (mit hoher Kantenstabilität)

Diagnose: z. B. Senk-/Spreizfuß

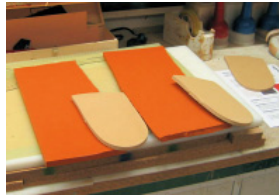

Eingesetztes Material: (Aufbau vom Fuß nach unten)

Material	Schicht	Funktion	Farbe	Stärke
nora® Lunatec SE	Basis (Härte: ca. 45 Shore A)	formgebend	137 terra	10 mm
nora® Lunacell	Stabilisierung (Härte: ca. 68 Shore A)	stützend	07 hautfarben	10 mm

nora® Lunatec SE ist vor allem für Einlagen, Sporteinlagen und Fußbettungen als stabilisierendes Formelement, z.B. zur Abstützung des Rückfußes, für Formelemente (z.B. bei Arthrosen, Knöchel-, Lähmungskappen und halbsteifen Laschen) oder für Interims- und Badeschuhe geeignet. Einlagen lassen sich einfach und effizient im Einblockverfahren fertigen.

Anfertigung:

1.



nora® Lunatec SE für die Basis der Einlage und nora® Lunacell als Stabilisierung im Rückfuß zuschneiden.

Aktivieren von nora® Lunatec SE in einer geschlossenen Wärmequelle.

Einstellung des Ofens: 130°-150° C

Erwärmung: ca. 10 Minuten


2.



Auf den Leisten legen und im Vakutherm anformen.

Tipp: das Auflegen einer Pelotte erleichtert die Anformung im retrokapitalen Bereich.

Abkühlung: ca. 20 Minuten

3.  Einstreichen und Aktivieren von nora® Lunacell.
Einstellung des Ofens: 130°-150° C
Erwärmung: ca. 5 Minuten
4.  In der Zwischenzeit die gezogene Einlage aus nora® Lunatec SE grob in Form schleifen.
5.  nora® Lunacell im Vakutherm anformen und Abkühlen lassen.
Abkühlung: ca. 10 Minuten
6.  Anschließend Formschleifen an der Schleifmaschine. Die Sporteinlage ist fertig und bietet dem Fuß auch bei starker Beanspruchung einen optimalen Halt.