

Eine hervorragende Verbindung...

Die Verbundplatte nora[®] Lunatec combi

nora[®]

→ Aktivier- und Abkühlzeiten



	<i>Aktivier- zeit in Minuten</i>	<i>Abkühl- zeit in Minuten</i>
Lunatec combi 1	6	12
Lunatec combi 2	11	22
Lunatec combi 3	10	20
Lunatec combi 4	5	10
Lunatec combi 5	3,5	7
Lunatec combi 6	6	12
Lunatec combi SK1	5	10

→ Tipps und Tricks

Einstellung des Ofens: 130°–150° C

Hintergrund: bei dieser Einstellung erreicht das Material durchgängig eine optimale Temperatur von 120°- 130° C. Bitte die unterschiedlichen Aktivierzeiten beachten!

Faustformel: Aktivierzeit x Faktor 2 = optimale Abkühlzeit.

Durch Auflegen eines feuchten, kalten Tuches oder den Einsatz von Tiefziehgeräten mit einem Kühlsystem, kann die Abkühlung beschleunigt werden.

Noch Fragen offen? Dann sprechen Sie uns bitte an...

nora systems GmbH | shoe components | D-69469 Weinheim
Telefon: (+49) 6201 - 80 5486 | Fax: (+49) 6201 - 88 4683
E-Mail: info-schuh@nora.com | Internet: www.nora-schuh.de