

2. Diabetesadaptierte Fußbettung

Körpergewicht: ca. 70 kg



Eingesetztes Material: (Aufbau vom Fuß nach unten)

Material	Schicht	Funktion	Farbe	Stärke
nora® Lunairmed	Decke	bettend	07 hautfarben	3 mm
nora® Lunatec combi 2	Polster (Lunairflex)	polsternd	07 hautfarben	6 mm
	Stabilisierung (Lunasoft SLW)	formgebend	17 grau beige	10 mm

Anfertigung:


- 

Platzhalter aus nora® Norit (3 mm) anformen.
Erwärmung: ca. 1,5 Minuten
Abkühlung: ca. 3 Minuten
- 

Aktivieren von nora® Lunatec combi 2.
Erwärmung: ca. 11 Minuten
- 

Anformung von nora® Lunatec combi 2 auf dem Leisten im Vakutherm.

4.

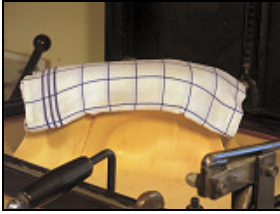

Abkühlen im Vakutherm.

Abkühlung: ca. 22 Minuten

5.



Formschleifen an der Schleifmaschine.

Empfehlung: Einhaltung einer Mindeststärke von ca. 7 mm im Vorfuß damit nach Abkleben der Decke eine Gesamtstärke von ca. 10 mm erhalten bleibt.

6.



Aufkleben (Klebstoff auf Polychloropren-Basis) der Abdeckung **nora**[®] **Lunairmed** OHNE Aktivierung.

Tipp: das „kalte“ Aufkleben der Decke gewährleistet, dass die Shore Härte erhalten bleibt. Eine Aktivierung würde hier zu einem Anstieg der Shore Härte führen.