

# 3. Diabetesadaptierte Fußbettung

Körpergewicht: ca. 90 kg



## Eingesetztes Material: (Aufbau vom Fuß nach unten)

Material	Schicht	Funktion	Farbe	Stärke
nora® Lunairmed	Decke	bettend	07 hautfarben	3 mm
nora® Lunatec combi 3	Polster (Lunalastik)	dauerelastisch	07 hautfarben	6 mm
	Stabilisierung (Lunasoft SLW)	formgebend	19 stein	10 mm

## Anfertigung:

1.



Platzhalter aus nora® Norit (3 mm) anformen.

Erwärmung: ca. 1,5 Minuten

Abkühlung: ca. 3 Minuten

2.



Aktivieren von nora® Lunatec combi 3.


Erwärmung: ca. 10 Minuten

3.



Anformung von nora® Lunatec combi 3 auf dem Leisten im Vakutherm.

4.

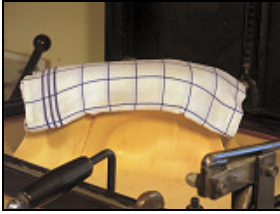

Abkühlen im Vakutherm.

**Abkühlung: ca. 20 Minuten**

5.



Formschleifen an der Schleifmaschine.

**Empfehlung:** Einhaltung einer Mindeststärke von ca. 7 mm im Vorfuß damit nach Abkleben der Decke eine Gesamtstärke von ca. 10 mm erhalten bleibt.

6.



Aufkleben (Klebstoff auf Polychloropren-Basis) der Abdeckung **nora**<sup>®</sup> **Lunairmed** OHNE Aktivierung.

**Tipp:** das „kalte“ Aufkleben der Decke gewährleistet, dass die Shore Härte erhalten bleibt. Eine Aktivierung würde hier zu einem Anstieg der Shore Härte führen.