

7. Langsohlige Einlage


Individuelle Einlagenversorgung in effizienter Ausführung (Verbundkeil)

Diagnose: Senk/Spreizfuß

Körpergewicht: ca. 90 kg



Abb. nicht maßstabsgetreu

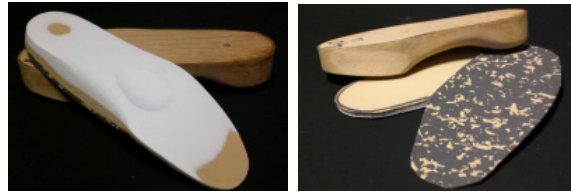

Eingesetztes Material:

(Aufbau vom Fuß nach unten)

Material	Schicht	Funktion	Farbe	Stärke
nora® Lunasoft SL	Decke	dauerelastisch	4452 safari	2 mm
nora® Lunatec combi	Polster (Lunalastik)	dauerelastisch	07 hautfarben	6 mm
SK 1 (Verbundkeil)	Stabilisierung (Lunasoft AL)	stabilisierend	09 weiß	8/2 mm

Anfertigung:

1.



Auswahl des geeigneten Verbundkeiles **nora® Lunatec combi SK 1** aus vier verschiedenen Größen:

Größe 1 (geeignet für Schuhgröße 35-39)

Größe 2 (geeignet für Schuhgröße 40-44)

Größe 3 (geeignet für Schuhgröße 45-49)

Größe 4 (geeignet für Schuhgröße > 49)

Materialien zuschneiden.

Aktivieren von **nora® Lunatec combi SK 1** in einer geschlossenen Wärmequelle.

Einstellung des Ofens: 130°-150° C

Erwärmung: ca. 5 Minuten

2.



Auf den Leisten legen und im Vakutherm anformen.

Tipp: Auflegen einer Pelotte erleichtert die Anformung im retrokapitalen Bereich.



Abkühlung: ca. 10 Minuten

Tipp: Durch das Auflegen eines feuchten, kalten Tuches, kann die Abkühlung beschleunigt werden.



Einlage auf der Unterseite und seitlich in Form schleifen. Bedingt durch die Keilform im Vorfuß wird der Schleifaufwand minimiert.

Vorteile:

weniger Materialeinsatz = Kosteneinsparung
weniger Schleifaufwand = Zeiteinsparung +
Abfallreduzierung




Einstreichen und Ablüften der geformten Einlage **nora**[®] Lunatec combi SK 1 und der Decke **nora**[®] Lunasoft SL trendline.



Anheften der Decke im Zehenbereich.



nora[®] Lunasoft SL trendline kurz aktivieren und verkleben.

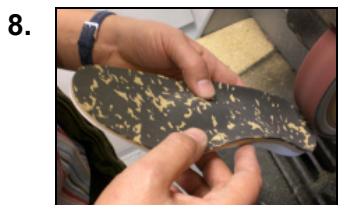

Decke beschneiden und in Form schleifen.