


8. Einlage, langsohlig

Diagnose: Senk-/Spreizfuß

Körpergewicht: ca. 90 kg

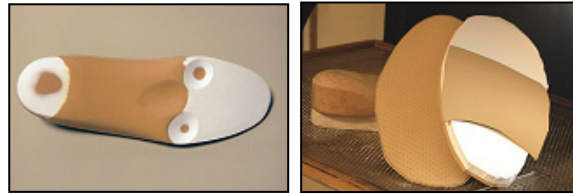

Eingesetztes Material:

(Aufbau vom Fuß nach unten)

Material	Schicht	Funktion	Farbe	Stärke
nora® Lunairmed perf.	Decke	bettend	07 hautfarben	3 mm
nora® Lunatec combi 1	Polster (Lunalastik)	dauerelastisch	07 hautfarben	6 mm
	Stabilisierung (Lunasoft AL)	stabilisierend	09 weiß	8 mm
nora® Lunacell	Stabilisierung	stabilisierend	07 hautfarben	1,5 mm

Anfertigung:

1.



Auf glatte Oberfläche des Leistens achten.

Tipp: Bei kleinen Unebenheiten mit einer Probeschuhfolie beziehen, dadurch wird die obere Schicht glatter, der Patient hat einen besseren Einstieg in den Schuh.

2.



Aktivieren von nora® Lunatec combi 1 in einer geschlossenen Wärmequelle.

Einstellung des Ofens: 130°–150° C

Erwärmung: ca. 6 Minuten


3.



Anformung von nora® Lunatec combi 1 auf dem Leisten im Vakuumtherm.

Tipp: Auflegen einer Pelotte erleichtert die Anformung im retrokapitalen Bereich.

4.

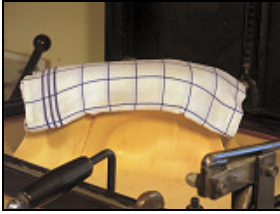

Abkühlen im Vakutherm.

Abkühlung: ca. 12 Minuten

5.



Formschleifen an der Schleifmaschine.

6.



Einkleben der Abdeckung **nora[®] Lunairmed perforiert**.

Tipp: bei perforierten Materialien Klebstoff möglichst dünn auftragen.

7.



Einstreichen und kurzes Aktivieren (maximal ca. 1 Minute) von **nora[®] Lunacell** zur Stabilisierung.

8.



Anformen von **nora[®] Lunacell** im Vakutherm.

9.



Anpassen der Stabilisierung an die Einlage.

10.



Entlastungszonen im Bereich MTK 2+5
Anzeichnen und Ausschleifen.