


9. Einlage, langsohlig (Finn-Comfort-Schuhe)

Diagnose: Senk-/Spreizfuß
Körpergewicht: ca. 90 kg

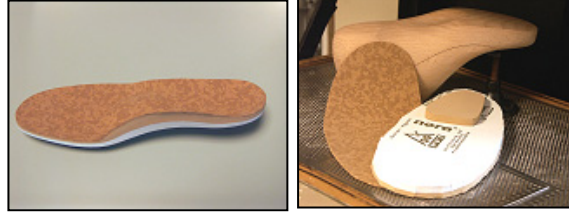

Eingesetztes Material:
(Aufbau vom Fuß nach unten)

Material	Schicht	Funktion	Farbe	Stärke
nora® Lunasoft SL cork	Decke	dauerelastisch	4445 korkoptik	2 mm
nora® Lunatec combi 1	Polster (Lunalastik)	dauerelastisch	07 hautfarben	6 mm
	Stabilisierung (Lunasoft AL)	stabilisierend	09 weiß	8 mm
nora® Lunairmed	Punktuell	druckentlastend	07 hautfarben	8 mm

Anfertigung:

1.



Auf glatte Oberfläche des Leistens achten.

Tipp: Bei kleinen Unebenheiten mit einer Probeschuhfolie beziehen, dadurch wird die obere Schicht glatter, der Patient hat einen besseren Einstieg in den Schuh.

2.



Aktivieren von nora® Lunatec combi 1 in einer geschlossenen Wärmequelle.

Einstellung des Ofens: 130°–150° C

Erwärmung: ca. 6 Minuten

3.



Anformung von nora® Lunatec combi 1 auf dem Leisten im Vakutherm.

Tipp: Auflegen einer Pelotte erleichtert die Anformung im retrokapitalen Bereich.

4.  Abkühlen im Vakuumtherm.
Abkühlung: ca. 12 Minuten
5.  Formschleifen an der Schleifmaschine.
6.  Einkleben der Abdeckung **nora® Lunasoft SL cork**.
7.  Großflächige Vorfußentlastung markieren und dünn ausschleifen.
8.  **nora® Lunairmed** einstreichen, kurz aktivieren (maximal ca. 1 Minute) und unter der Presse anformen.
9.  Vorfußentlastung in Form schleifen.