


Hygienisch & sauber..

Pflegeempfehlung für nora® Materialien

nora®
Pflegeempfehlung für nora® Luna-Materialien

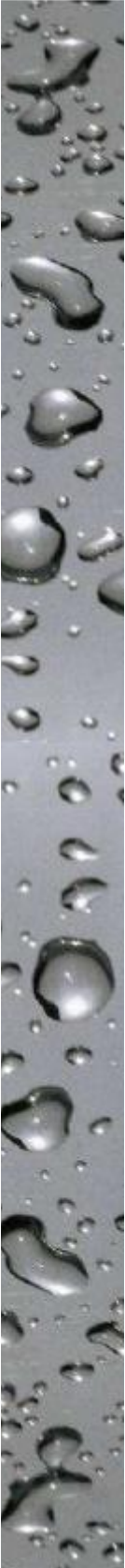

Eine regelmäßige, hygienisch einwandfreie Pflege besteht aus **Vorreinigung** der Einlagen und anschließender **Desinfektion** unter Beachtung folgender Hinweise: Passendes Desinfektionsmittel, Einhaltung der Einwirkzeit und Einwirktemperatur sowie Beachtung der Hygiene-Tipps und Pflegehinweise.

Vorbehandlung

Nachdem Sie die Einlagen aus den Schuhen entnommen haben, empfiehlt sich eine Vorbehandlung mit Wasser und Seifenlauge zur Entfernung grober Verschmutzungen (Hautschuppen, Wundsekrete etc.). Nach der Vorbehandlung sollten die Einlagen mit Papierhandtüchern* abgetrocknet werden.

*Papierhandtücher zur einmaligen Benutzung gewährleisten zusätzlich Keimfreiheit und Sauberkeit

Desinfektion

Die Desinfektion erfolgt mit einem handelsüblichen **Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis** (z.B. **Bacillol AF*** | erhältlich in Apotheken und Sanitätshäusern). Sprühen Sie die Einlagen im Abstand von ca. 20 cm von allen Seiten gründlich ein. Bereits nach 15 Minuten erfolgt in der Regel eine 100%ige Keimzahl-Reduktion. Zur Sicherheit können Sie das Desinfektionsmittel bei Raumtemperatur auch etwas länger einwirken lassen, um alle Bakterien und Keime abzutöten. Das Material ist geschlossenzellig, so dass nichts eindringen kann.

Empfohlene Häufigkeit: täglich / nach jedem Tragen.

Hygiene-Tipps

Um die Wirksamkeit der Desinfektion der Einlagen zu gewährleisten, sind nachfolgende Hinweise zu beachten:

- Täglicher Wechsel der Strümpfe wird dringend empfohlen
- Strümpfe sollten möglichst im Kochwaschgang, mindestens jedoch bei 60°C in der Maschine unter Zugabe von Standard-Waschmitteln gewaschen werden.

Pflegehinweise

Bitte beachten Sie bei der Anwendung folgende Pflegehinweise:

1. Desinfektionsmittel dürfen keinesfalls mit anderen Mitteln oder Reinigern gemischt werden, weil dadurch die Wirksamkeit aufgehoben werden kann.
2. Desinfektionsmittel dürfen nicht auf nasse Oberflächen aufgebracht werden, um eine unkontrollierte Verdünnung mit dadurch verursachter Verminderung der Wirksamkeit auszuschließen.
3. Desinfektionsmittel nie in der Nähe offener Flammen verwenden (brennbar) und vor Überhitzung schützen.

Das **Flächendesinfektionsmittel Bacillol AF ist ein aldehydfreies, alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel, aldehyd- und parfümfrei, trocknet rückstandsfrei aus. Herstellerhinweise bei der Anwendung beachten.*

Die Pflegeempfehlung wurde in Zusammenarbeit mit dem PFI, Pirmasens erstellt.

